

Інструкція для застосування.

Ізотонічний розчин для зволоження та очищення носових каналів.

Медичний виріб

Склад: вода, натрію хлорид, кальцію хлорид, калію хлорид, глобули евкаліптової олії, ментол, натрію гідрофосфат, бензалконія хлорид.

Призначений до використання

Ізотонічний розчин для зволоження та очищення носових каналів.

Назальний спрей **Апіколд мінт** нормалізує функцію слизової оболонки носа природним шляхом. Дрібно дисперсний ізотонічний розчин діє на всю поверхню слизової оболонки носа. Склад продукту допомагає відновити природний рівень рН та гідратацію слизової оболонки носа, а також допомагає зволоженню сухої слизової оболонки та видаленню сухого секрету з носа для полегшення дихання. Додавання олії ментолу та евкаліпту надає приємне відчуття свіжості після застосування.

Рекомендовано

- для щоденної гігієни слизової оболонки для дітей та дорослих
- при проживанні у номерах з кондиціонерами
- при дії пилу та шкідливих атмосферних впливів
- при перебуванні у сухих і теплих приміщеннях (центральне опалення)
- при симптомах алергічного риніту та простудних захворювань

Інструкції щодо застосування

Зняти захисний ковпачок. Вставити кінчик назального спрею в ніздрю, натиснути на розпилювач і обережно вдихнути носом. Для зволоження слизової оболонки носа, досить одного розпилення в кожную ніздрю кілька разів на день.

З метою усунення закладеності носа, вприскнати

Пояснення символів, зазначених на упаковці

Апіколд мінт один або два рази в кожную ніздрю і повторити кілька разів протягом дня.

Обережно

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не рекомендується дітям віком до 4 років. З гігієнічною метою рекомендується індивідуальне використання флакону. Особам з підвищеною чутливістю до окремих компонентів, препарат не рекомендується застосовувати спрей **Апіколд мінт**.

Рекомендується використовувати продукт протягом 30 днів після першого відкриття флакона. Тільки для зовнішнього застосування.

Зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при кімнатній температурі

Кількість нетто: 30 мл.

Номер партії та дата закінчення терміну придатності вказані на нижній частині упаковки.

Виробник:



АПІФАРМА д.о.о., Джероніма Каванджина 26, 10090 Загреб, Хорватія, ЄС.

тел.: + 385 (0)1 6399 000

APIPHARMA d.o.o., Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, Croatia, EU

tel.: + 385 (0)1 6399 000

Вироблено для:



Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцарія
Alpen Pharma AG, Bern, Switzerland

Уповноважений представник в Україні:

ПрАТ «Натурфарм» Україна, 04075 Київ,





Пуца-Водиця, вул. Лісна, 30-А,





телефон (044) 401-81-03.

Дотримуйтесь правил, які викладені

в Інструкції для застосування продукту.

Дата останнього перегляду: лютий 2018 р.

	Ознайомтесь з інструкцією для застосування
	Придатний до
	Обережно
	Знак Європейської відповідності

	Виробник
	Номер партії
	номер за каталогом
	Знак відповідності технічним регламентам

Апіколд

спрей оральний

Інструкція для застосування.

Зменшує подразнення та заспокоює запалене горло. Медичний виріб

Склад: спирт етиловий, вода, екстракт прополісу, гліцерин, олія м'яти перцевої.

Призначений до використання:

Апіколд спрей заспокоює запалене горло та зменшує подразнення слизової оболонки ротової порожнини, які є частими симптомами простудних захворювань різного походження (грипп, вірусна інфекція).

Інструкції щодо застосування:

Апіколд спрей необхідно розпиляти безпосередньо на запалену ділянку горла 2-3 рази на день. Таким чином утворюється захисна плівка з екстракту прополісу і гліцерину.



Обережно

Зберігати в недоступному для дітей місці. Особам з підвищеною чутливістю до прополісу не рекомендується використовувати продукт. Незначна реакція печіння обумовлена наявністю спирту.

Зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Кількість нетто: 20 мл.

Номер партії та дата закінчення терміну придатності вказані на нижній частині упаковки.



Виробник:

АПІФАРМА д.о.о., Джероніма Каванджина 26, 10090 Загреб, Хорватія, ЄС.
тел.: + 385 (0)1 6399 000
APIPHARMA d.o.o., Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, Croatia, EU
tel.: + 385 (0)1 6399 000

Вироблено для:





Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцарія
Alpen Pharma AG, Bern, Switzerland





Уповноважений представник в Україні:

ПрАТ «Натурфарм» Україна, 04075 Київ, Пуща-Водиця, вул. Лісна, 30-А, телефон (044) 401-81-03.

Дотримуйтесь правил, які викладені в Інструкції для застосування продукту. Дата останнього перегляду: лютий 2018 р.

Пояснення символів, зазначених на упаковці

	Ознайомтесь з інструкцією для застосування
	Придатний до
	Обережно
	Знак Європейської відповідності

	Виробник
	Номер партії
	номер за каталогом
	Знак відповідності технічним регламентам

Інструкція для застосування. Ізотонічний розчин для зволоження та очищення носових каналів.

Медичний виріб

Склад: вода, натрію хлорид (морська сіль), екстракт прополіса, бензалконій хлорид.

Призначений до використання:

Ізотонічний розчин для зволоження та очищення носових каналів.

Назальний спрей **Апіколд пропо** нормалізує функцію слизової оболонки носа природним шляхом. Дрібно дисперсний ізотонічний розчин діє на всю поверхню слизової оболонки носа. Склад продукту допомагає встановити природний рівень рН та гідратацію слизової оболонки носа, а також допомагає зволоженню сухої слизової оболонки та видаленню сухого секрету з носа для полегшення дихання.

Рекомендовано

- для щоденної гігієни слизової оболонки для дітей та дорослих
- при проживанні у номерах з кондиціонерами
- при дії пилу та шкідливих атмосферних впливів
- при перебуванні у сухих і теплих приміщеннях (центральне опалення)
- при симптомах алергічного риніту та простудних захворювань

Інструкції щодо застосування

Розпилюйте **Апіколд пропо** в обидві ніздрі, по мірі необхідності. Одне розпилення в кожную ніздрю достатнє для зволоження сухої слизової оболонки. Для видалення сухого секрету з носа, рясно розпилюйте **Апіколд пропо** в обидві ніздрі.



Обережно

Зберігати в недоступному для дітей місці. Не рекомендується дітям віком до 4 років. З гігієнічною метою рекомендується індивідуальне використання флакону. Особам з підвищеною чутливістю до прополісу не рекомендується застосовувати спрей **Апіколд пропо**.

Рекомендується використовувати продукт протягом 30 днів після першого відкриття флакона. Тільки для зовнішнього застосування.


Зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при кімнатній температурі

Кількість нетто: 30 мл.

Номер партії та дата закінчення терміну придатності вказані на нижній частині упаковки.

Виробник:


 АПІФАРМА д.о.о., Джероніма Каванджина 26, 10090 Загреб, Хорватія, ЄС.

тел.: + 385 (0)1 6399 000

APIPHARMA d.o.o., Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, Croatia, EU

tel.: + 385 (0)1 6399 000

Вироблено для:

 Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцарія
Alpen Pharma AG, Bern, Switzerland

Уповноважений представник





в Україні:





ПрАТ «Натурфарм» Україна, 04075
Київ, Пуща-Водиця, вул. Лісна, 30-А,
телефон (044) 401-81-03.

Дотримуйтесь правил, які викладені в Інструкції для застосування продукту.

Дата останнього перегляду: лютий 2018 р.

Пояснення символів, зазначених на упаковці

	Ознайомтесь з інструкцією для застосування
	Придатний до
	Обережно
	Знак Європейської відповідності

	Виробник
	Номер партії
	номер за каталогом
	Знак відповідності технічним регламентам